

# SVEMA SANITRUST WIPES






## Oberflächen-Desinfektionstücher Weiß & Oberflächen-Desinfektionstücher Blau

Ethanolbasierte Desinfektionstücher zur raschen Desinfektion von alkoholresistenten Flächen in den Bereichen Lebensmittel, Tiermedizin, Medizin, Industrie, Haushalt und institutionellen Bereichen.

Sanitrust Wipes haben ein breites Spektrum an bakterizider (einschließlich MRSA, VRE), mykobakterizider, vollständig viruzider (einschließlich aller behüllten Viren, Noro, Rota, Adeno, Polio), fungizider und levurozider Wirkung



### TECHNISCHE INFORMATIONEN

<b>Wirkstoff</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ethanol CAS no 64-17-5 (57 g); Propan-2-ol CAS no 67-63-0 (6 g)</li> </ul>				
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nicht parfümiert</li> <li>Kanister mit 150 blauen Tüchern: 20x20cm; 30g/m<sup>2</sup>; Vliesstoff, fusselfrei; Kanister mit 200 weißen Tüchern: 20x20cm; 28g/m<sup>2</sup>; Vliesstoff, fusselfrei</li> </ul>				
<b>Aufbewahrung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ist in der ungeöffneten Verpackung unter normalen Lagerbedingungen 30 Monate haltbar.</li> <li>Vor Frost schützen, zwischen 5°C und 30°C lagern.</li> </ul>				
<b>Gebrauchsanweisung</b>	<p>1. Um das erste Tuch zu entnehmen, entfernen Sie den Behälterdeckel und ziehen Sie das erste Tuch mit sauberen Händen aus der Mitte der Rolle. Setzen Sie den Dosendeckel wieder auf, indem Sie das erste Tuch durch die Öffnung im Deckel ziehen.</p> 	<p>2. Die vorgereinigte Oberfläche abwischen. Wenn nötig, mehrere Tücher benutzen. 5 Minuten einwirken lassen. Verpackung nach Gebrauch gut verschließen.</p> 	<p>3. Trocknen lassen, nicht abspülen. Bei Bedarf mehrere Tücher verwenden.</p> 	<p>4. Entsorgen Sie das Wischtuch gemäß den Anweisungen auf dem Etikett.</p> 	<p>5. Wiederholen Sie den Vorgang entsprechend des gültigen Hygieneprotokolls.</p> 
<b>Gesetzliche Bestimmungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biozid PT2, PT4. AL - andere Flüssigkeit, die unverdünnt anzuwenden ist</li> <li>Professioneller Gebrauch</li> </ul>				
<b>Verträglichkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Produkt ist kompatibel mit den meisten Oberflächen außer alkoholempfindlichen Oberflächen (Plexiglas, etc.)</li> <li>Das Produkt wird als Desinfektionsmittel für den Lebensmittelkontakt genutzt, es ändert keine Lebensmittel (Geschmack, Geruch) nach Tetrad Test ASTM International E3009-15</li> </ul>				
<b>Hautverträglichkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gute Hautverträglichkeit</li> <li>Unter dermatologischer Kontrolle getestet</li> </ul>				
<b>Vorsichtsmassnahmen bei der Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nicht verschlucken</li> <li>Nicht mit anderen Produkten mischen</li> <li>Biozide sicher anwenden</li> <li>Lesen Sie vor dem Gebrauch immer das Etikett und die Produktinformation</li> <li>Inhalt/Behälter in einen zugelassenen Abfallentsorgungsbehälter entsorgen</li> <li>Verpackung nicht wiederverwenden</li> <li>Weitere Informationen finden Sie auf dem Produkt-Sicherheitsdatenblatt</li> <li>In Notfällen wenden Sie sich an die nächstgelegene Giftnotrufzentrale</li> </ul>				

ANTIMIKROBIELLE AKTIVITÄT	
Wirksam gegen	Kontaktzeit
BAKTERIEN (EINSCHL. MRSA, VRE)	15 sec
LEVUROZIDE WIRKUNG: CANDIDA ALBICANS	15 sec
MYKOBAKTERIEN: (M. AVIUM, M. TERRAE)	30 sec
FUNGIZIDE AKTIVITÄT: ASBERGILLUS BRASILIIENSIS	120 sec
VIREN: VACCINIA, HIV, HBV, HCV, ROTA, NORO	15 sec
VIREN: ADENOVIRUS	30 sec
VIREN: POLIO-VIRUS	120 sec
NORMEN	EN13727, EN14561, EN13697, EN13624, EN14562, EN14348, EN14563, EN14476, EN16777, EN17387, EN16615, EN1650, EN1276.

\*Studie unter sauberen Bedingungen durchgeführt

VERPACKUNG	ARTIKELNUMMER	KARTON
Produktname		Stück
SVEMA SANITRUST WIPES (200 Count Canister)	5020-80-06	6
SVEMA SANITRUST WIPES BLUE (150 Count Canister)	5030-80-06	6