

SVEMA SANITRUST SPRAY





Spray desinfectante rápido a base de etanol para superficies tolerantes al alcohol en áreas médicas, alimentarias, veterinarias, industriales, domésticas e institucionales.

Sanitrust Spray tiene un amplio espectro de actividad bactericida (incluidos MRSA, VRE), micobactericida, totalmente virucida (incluidos todos los virus con envoltura, Noro, Rota, Adeno, Polio), fungicida y levuricida.

- Sanitrust Spray está listo para usar.
- Aplíquelo sobre la superficie, asegurando una cobertura completa.
- Las superficies deben permanecer visiblemente humedecidas durante 30 segundos para que haga efecto.
- Uso profesional.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Sustancia activa	<ul style="list-style-type: none"> • 100 g de producto contienen ingredientes activos Etanol CAS no 64-17-5 (57 g); Propano-2-ol CAS no 67-63-0 (6 g) 			
Especificaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Fragancia: sin fragancia • Color: Transparente • Densidad relativa 20°C: 0.88 - 0.89 • pH: 7-8.5 			
Conservación	<ul style="list-style-type: none"> • Puede conservarse durante 30 meses en su envase original cerrado en condiciones normales de almacenamiento. • No congelar, conservar entre 5°C y 30°C. 			
Instrucciones de uso	1. Pulverizar de 10 a 30 ml/m ² sobre superficie previamente limpiada.  10-30ml/m ²	2. Dejar actuar entre 2 min y 5 min en función del efecto deseado..  2min-5min	3. No aclarar 	4. Repita la operación de acuerdo con el protocolo de higiene vigente.. 
Reglamento	<ul style="list-style-type: none"> • Biocida PT2 y PT4 , AL - otro líquido que debe aplicarse sin diluir • Uso profesional 			
Compatibilidad	<ul style="list-style-type: none"> • El producto es compatible con la mayoría de las superficies lisas, excepto las sensibles al alcohol (plexiglás, etc.). • El producto, en su uso como desinfectante de superficies en contacto con alimentos, no altera el sabor ni el olor de los alimentos, según la prueba Tetrad ASTM International E3009-15 			
Compatibilidad cutánea	<ul style="list-style-type: none"> • Buena compatibilidad cutánea • Probado bajo control dermatológico 			
Precauciones de uso	<ul style="list-style-type: none"> • No ingerir • No mezclar con otros productos • Utilice los biocidas de forma segura • Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de usarlo • Eliminar el contenido/envase en un contenedor de residuos autorizado • No reutilizar el envase • Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad del producto • En caso de emergencia, póngase en contacto con el Centro de Toxicología más cercano 			

ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA	
Activo contra	Tiempo de contacto
BACTERIAS (INCL. MRSA, VRE):	15 sec
ACTIVIDAD LEVURICIDA: CANDIDA ALBICANS	15 sec
MICOBACTERIAS: (M.AVIUM, M.TERRAE)	30 sec
ACTIVIDAD FUNGICIDA: ASBERGILLUS BRASILIENSIS	120 sec
VIRUS: VACCINIA, HIV, HBV, HCV, ROTA, NORO	15 sec
VIRUS: ADENOVIRUS	30 sec
VIRUS: POLIO VIRUS	120 sec
NORMAS	EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 17387, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 16615, EN 16777, EN 1650, EN 1276

*Estudio realizado en condiciones limpias

ENVASE	NÚMERO DE PRODUCTO	CANTIDAD/ CAJA
Nombre del producto		Unidades
SVEMA SANITRUST SPRAY (750 ml Bottle)	5040-90-06	6



SVEMA Hygiene GmbH
Paul-Ehrlich-Str. 18,
63322 Rödermark, Germany
www.svemagroup.com
info@svemagroup.com
Tel.: +49 (0) 6074 9196057