

## SVEMA SANITRUST SPRAY





**Spray désinfectant rapide à base d'éthanol pour les surfaces compatibles avec l'alcool dans les domaines médical, alimentaire, vétérinaire, industriel, domestique et institutionnel.**

Sanitrust Spray a un large spectre d'activité bactéricide (y compris MRSA, VRE), mycobactéricide, entièrement virucide (y compris tous les virus enveloppés, Noro, Rota, Adeno, Polio), fongicide et levuricide.

- Sanitrust Spray est prêt à l'emploi.
- Appliquez-le sur la surface en veillant à la couvrir entièrement.
- Les surfaces doivent rester visiblement humides pendant 30 secondes pour agir.
- Usage professionnel.



### INFORMATION TECHNIQUE

|                                   |  |  |   |  |
|-----------------------------------|--|--|---|--|
| <b>Substance active</b>           | • 100 g de produit contiennent des substances actives : Ethanol CAS no 64-17-5 (57 g) ; Propan-2-ol CAS no 67-63-0 (6 g)   |  |   |  |
| <b>Caractéristiques</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parfum: non parfumé</li> <li>• Couleur: transparente</li> <li>• Densité relative à 20°C : 0.88 - 0.89</li> <li>• pH : 7-8,5</li> </ul>  |  |   |  |
| <b>Conservation</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peut être conservé pendant 30 mois dans son emballage d'origine fermé dans des conditions de stockage normales.</li> <li>• Ne pas congeler, conserver entre 5°C et 30°C.</li> </ul>   |  |   |  |
| <b>Mode d'emploi</b>              | 1. Vaporiser 10 à 30 ml/m <sup>2</sup> sur la surface préalablement nettoyée.<br><br>10-30ml/m <sup>2</sup>   | 2. Laisser agir entre 2 min et 5 min selon l'effet désiré.<br><br>2min-5min | 3. Ne pas rincer<br> | 4. Répéter l'opération selon le protocole d'hygiène en place.<br> |
| <b>Réglementation</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produit biocide PT2 et PT4, AL - autre liquide à appliquer non dilué</li> <li>• Usage professionnel</li> </ul>  |  |   |  |
| <b>Compatibilité</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le produit est compatible avec la plupart des surfaces lisses, à l'exception des surfaces sensibles à l'alcool (plexiglas, etc.).</li> <li>• Le produit, utilisé comme désinfectant des surfaces en contact avec les aliments, n'altère pas le goût ou l'odeur des aliments, conformément au test Tetrad ASTM International E3009-15.</li> </ul>  |  |   |  |
| <b>Compatibilité avec la peau</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bonne compatibilité avec la peau</li> <li>• Testé sous contrôle dermatologique</li> </ul>   |  |   |  |
| <b>Précautions d'emploi</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas ingérer</li> <li>• Ne pas mélanger avec d'autres produits</li> <li>• Utiliser les biocides en toute sécurité</li> <li>• Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser</li> <li>• Jeter le contenu/récipient dans un conteneur agréé pour l'élimination des déchets.</li> <li>• Ne pas réutiliser l'emballage</li> <li>• Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données de sécurité du produit.</li> <li>• En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche.</li> </ul> |  |   |  |

| ACTIVITÉ ANTIMICROBIENNE                      |  |
|---|--|
| Actif contre                                  | Temps de contact   |
| BACTÉRIES (Y COMPRIS MRSA, VRE)               | 15 sec   |
| ACTIVITÉ LEVURICIDE : CANDIDA ALBICANS        | 15 sec   |
| MYCOBACTÉRIES : (M.AVIUM, M.TERRAE)           | 30 sec   |
| ACTIVITÉ FONGICIDE : ASBERGILLUS BRASILIENSIS | 120 sec  |
| VIRUS: VACCINIA, HIV, HBV, HCV, ROTA, NORO    | 15 sec   |
| VIRUS: ADENOVIRUS                             | 30 sec   |
| VIRUS: POLIO VIRUS                            | 120 sec  |
| NORMES  | EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 17387, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 16615, EN 16777, EN 1650, EN 1276 |

L'étude a été menée dans des conditions propres

| CONDITIONNEMENT                       | CODE PRODUIT | CARTON |
|---------------------------------------|--------------|--------|
| Nom du produit                        |              | Pièces |
| SVEMA SANITRUST SPRAY (750 ml Bottle) | 5040-90-06   | 6      |



**SVEMA Hygiene GmbH**  
Paul-Ehrlich-Str. 18,  
63322 Rödermark, Germany  
[www.svemagroup.com](http://www.svemagroup.com)  
[info@svemagroup.com](mailto:info@svemagroup.com)  
Tel.: +49 (0) 6074 9196057